



BodyFX™ • MiniFX™ by Inmode

Raffermisssement et traitement anticellulite

Solution non-invasive ciblant les tissus gras et le relâchement cutané.
Technologie A.C.E. pour une maîtrise complète de la diffusion thermique
et une sécurité maximale.

BodyFX™ et MiniFX™ permettent par la synergie de l'effet thermique et de l'électroporation, un remodelage corporel pour toutes les zones du corps et le cou, en ciblant les tissus gras indésirables et le relâchement cutané.

- **Première étape** - Aspiration douce de la peau pour traiter un plus grand volume de cellules grasses et permettre de délivrer l'énergie optimale en profondeur $\approx 2,5\text{cm}$.
- **Deuxième étape** - L'énergie RF permet de préchauffer précisément et uniformément le tissu et le pannicule adipeux sous-cutané provoquant le raffermisssement de la peau $\approx 42-43^\circ\text{C}$ en surface.
- **Troisième étape** - Simultanément, lorsque l'objectif fixé est atteint, une deuxième impulsion RF de haute amplitude est induite à la fin de chaque pulse, pour détruire sélectivement les cellules grasses par effet d'électroporation.
- Une mesure en continue de la température délivrée aux tissus est réalisée grâce à un capteur intégré sur la pièce à main avec lecture sur écran LCD. Ce système permet de suivre et de maintenir la température optimale dans les tissus.
- De nombreuses études cliniques avec histologies démontrent une réduction de la circonférence et une contraction des tissus.



fesses bras cuisses genoux ventre cou abdomen





BodyFX™ • MiniFX™

by InMode



SPÉCIFICATIONS

PIÈCE À MAIN	BodyFX	MiniFX
Dimensions	5 cm x 2,50 cm	2,54 cm x 2,54 cm
Zones de traitement	Grandes zones (ex. cuisses, fesses, abdomen, dos...)	Petites zones (ex. cou, genoux, intérieur des bras...)
Intensité Radiofréquence	Jusqu'à 50 W	Jusqu'à 20 W
Largeur impulsion RF	de 2 jusqu'à 7 s	
Aspiration	Jusqu'à 500 mbar	
Tension électrique/2nd RF	10x2 kV impulsions	
Fréquence	1 MHz	
Contrôle de la température	Mesures en temps réel de la température. Dispositif d'arrêt automatique dès que le « seuil » programmé par l'opérateur est atteint entre 35-43 °C	


LES AVANTAGES DE LA TECHNOLOGIE A.C.E.

Technologie révolutionnaire, unique et brevetée A.C.E. (Acquire. Control. Extend.), permettant d'optimiser, de contrôler et de répartir l'énergie en toute sécurité.

- **Acquérir.** Un pré-chauffage des tissus réduit le seuil d'apoptose sélective des adipocytes.
- **Contrôler.** Une surveillance sophistiquée et un suivi performant de la température des tissus et de l'impédance permet d'atteindre et de maintenir la température optimale pour prévenir les dommages aux tissus environnants. De plus le praticien programme une température « seuil » qui met automatiquement le système hors tension.
- **Étendre.** La surveillance et le contrôle actifs de la température, assurent des seuils de sécurité sans précédent.

La plupart des autres fabricants proposent leur solution pour la prise en charge de la silhouette sous forme d'un système autonome et extrêmement onéreux. BodyFX™ est le système tout-en-un pour le raffermissement du corps, le resserrement cutané et l'élimination des adipocytes... sans consommable ni gel.

Dr J. Diamond - BodyFX - 8 traitements, 40 W, 41° C - Patiente de 55 ans

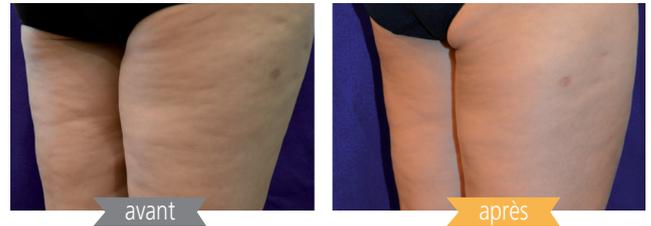

Dr S. Mulholland - BodyFX - 3 mois après 6 traitements (1/semaine)



Dr S. Mulholland - BodyFX - Après 3 mois de traitement



MÉCANISME D'ACTION BodyFX™ & MiniFX™

